

ANLEITUNG FÜR DIE VORBEREITUNG IM KRANKENHAUS

Die folgende Anleitung erläutert die notwendigen Schritte im Krankenhaus, um eine sichere und ordnungsgemäße Übernahme der Medizinprodukte vorzunehmen.

Wichtige Hinweise

Beachten Sie die folgenden Punkte:

- › Achten Sie darauf, dass die Vorreinigung im Krankenhaus unmittelbar nach dem Einsatz der Medizinprodukte erfolgt, damit Rückstände nicht eintrocknen und somit schwerer zu entfernen sind.
- › Führen Sie die Vorbereitung sachgemäß durch und stellen Sie sicher, dass die Medizinprodukte nicht beschädigt werden.
- › Fügen Sie bitte die Original-Herstellerinformationen/Original-Herstellerlabel dem entsprechenden Medizinprodukt bei.

VORSICHT

Infektionsgefahr durch biogefährliche Medizinprodukte!

- › Behandeln und lagern Sie die Medizinprodukte gemäß den entsprechenden Schutzbestimmungen.
- › Benutzen Sie Schutzhandschuhe und Schutzbrille.

Vorbereitung und Prüfung

Sammeln und reinigen Sie nur vollständige und mechanisch unbeschädigte Medizinprodukte (ohne Kratzer, Risse, Abknickungen oder sonstige Beschädigungen).

Reinigung

- › Vermeiden Sie Beschädigungen (Biegen von Schäften, Abknicken usw.).
- › Wischen Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch ab und verwenden Sie ausschließlich kaltes, klares Wasser zur Reinigung der Medizinprodukte. Das Abwischen von Schäften soll von proximal nach distal erfolgen.
- › Bewegliche Teile sind in beiden Endpositionen zu reinigen.
- › Verwenden Sie keine Desinfektionsmittel und führen Sie keine thermische Desinfektion durch.
- › Im Falle von Kathetern mit Lumen sind die Lumen mit kaltem Wasser zu spülen. Es ist darauf zu achten, dass keine Flüssigkeit in das Handstück gelangt.

Trocknen

Wischen Sie das gereinigte Medizinprodukt mit einem sauberen Tupfer oder einem fusselfreien Einmaltuch trocken.

Verpacken

Bringen Sie das vorgereinigte Medizinprodukt in die Ausgangsstellung („entspannter“ Zustand) und legen es einzeln in lockeren Schleifen (Vermeiden Sie Knicke!) zusammen mit den Original-Herstellerinformationen/Original-Herstellerlabel in einen zur Verfügung gestellten Kunststoffbeutel. Stellen Sie sicher, dass die notwendigen Original-Herstellerinformationen/Original-Herstellerlabel (REF-Nr.; LOT-Nr.; Verwendbarkeitsdatum) dem Medizinprodukt beigelegt wurden und verschließen Sie den Zippverschluss. Legen Sie das vorbereitete Medizinprodukt in die bereitgestellte grüne Transportbox.

Im Falle von Ultraschallscheren bitte den Klingelschlüssel mit in den Sammelbeutel packen (ohne den Schlüssel kann das Produkt von uns nicht bearbeitet werden).

Lagerung und Abholung

Halten Sie bitte die Transportbox stets geschlossen und öffnen Sie diese nur zum Einlegen der gereinigten Medizinprodukte.

- › Wenn die grüne Transportbox ausreichend gefüllt ist, füllen Sie den Übergabeschein vollständig aus und legen diesen unterschrieben in die Transportbox. Drücken Sie die beiliegenden roten Plomben jeweils rechts und links in die dafür vorgesehenen Öffnungen.
- › Benachrichtigen Sie bitte Ihren Ansprechpartner.